

NUESTRO PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

EL QUÉ

CÓMO

CON QUÉ

CUÁNDO

QUIÉN

Elementos a mantener

Tipo de mantenimiento, limpieza y desinfección

Agente a utilizar (p.ej. Desinfectante)

Tiempo, frecuencia y referencia al citado plan de higiene

Todo el personal que esté familiarizado con la preparación del dispositivo médico.

Antisepsia Oral

Enjuague

Limpieza y cuidado de la cavidad bucal, así como bolsas periodontales durante el tratamiento de parodontosis o la retirada de sarro dental

Solución de enjuague lista para usar
Producto:

Antes, durante y después del tratamiento médico.

Persona encargada:

Manos y Piel

Lavado

Preparación de detergente dermatológicamente inocuo.



KDM Wash

Alternativa:
+ toallas de manos de un solo uso

Antes de empezar a trabajar, después del tratamiento, y en cualquier caso de contaminantes visibles y después de ir al aseo.

Persona encargada:

Desinfección

Preparación alcohólica lista para su uso
Producto:

Si fuese necesario, antes y después de cualquier tratamiento a pacientes, incluso cuando se lleven a cabo otras tareas con riesgo de contaminación (p.ej. Rayos X, cuidado de instrumentos)

Higiénica:
Quirúrgica:

Enseres fijos

Superficies sensibles (como piel auténtica o sintética, unidades de rayos X, acrílicos y polimetilmetacrilatos)

Desinfección y limpieza

Humedezca completamente las superficies y objetos que tengan que desinfectarse.

Preparación p.ej.:



KDM Kwipes Spray ó

KDM Kwipes toallitas (listo para usar)

Alternativa:
Donde las superficies son sensibles al alcohol:
Producto:

Al comienzo o al final de la jornada laboral, así como en la zona de tratamiento después de que haya sido contaminada o después de cada tratamiento.

Persona encargada:

Suelos Duros

En caso de contaminación visible con saliva, sangre y pus

Limpieza húmeda

Fregar las habitaciones
(método con dos cubos)

Limpieza sin añadir desinfectantes

Producto:
Dosificación:

Al final del día o después de contaminación visible.

Persona encargada:

Suelos Textiles (moquetas)

Pasar la aspiradora a las habitaciones

Aspirar con filtro especial DIN 24 184, filtro para sustancias en suspensión o aspiración central.

Al final del día

Instrumentos rotatorios

En general, para tratamientos restaurativos y ortodónticos

p.ej. Fresas, cortadores, pulidores, bruñidores, instrumentos de acabado, cepillos.

El procedimiento se lleva a cabo directamente después del tratamiento con relación a la evaluación del riesgo y clasificación de los dispositivos médicos (de acuerdo con las instrucciones de uso del fabricante)

1 Ausencia de riesgo de contaminación durante el transporte a la zona de limpieza.

2 Limpieza previa sin fijación de proteína

3 Limpieza y desinfección

3.1 Baño químico

Sumerja completamente los instrumentos desmontados en la solución limpiadora y desinfectante (cuando sea necesario, también en el limpiador ultrasónico), teniendo en cuenta el tiempo de efecto.

Enjuague con agua apropiada y seque.

3.2 Mecanizado

P. ej. Limpieza y desinfección en una termodesinfectadora según las indicaciones del Fabricante

4 Comprobar si los instrumentos están limpios e intactos. Si fuese necesario, repita el paso 3

5 Identificación

6 Cuidado y mantenimiento

7 Comprobación funcional

8 Etiquetado (si fuese necesario)

9 Esterilización por vapor con procedimientos validados eficaces (ej. Tipo S ó B)

9.1 - Instrumentos no críticos*:

No es necesario esterilización por vapor

9.2 - Instrumentos semicríticos**:

Sin embolsar en bandejas y soportes para insertos, etc. O embolsados en bolsas estériles de acuerdo con EN 868 resp. DIN 58952/58953

Tiempo de trabajo (minutos):

Desinfectante de instrumental:

Preparación p. ej.:



KDM Biodes-K Forte 1Lt

Dosificación:

Tiempo de contacto:

Tiempo de permanencia:

Producto:

Marca de la máquina:

Temperatura: (°C)

Tiempo de ejecución: min.

Marca de la máquina:

Temperatura: (°C)

Tiempo de ejecución: min.

Después de cada tratamiento y después de que haya muestras de contaminación

Persona encargada:

Instrumentos comunes

En general, para Instrumental para tratamientos generales, restaurativos y ortodónticos.

Limpieza y desinfección ó desinfección antes de la limpieza si hay riesgo de heridas, seguido de esterilización si fuese necesario.

Persona encargada:

Instrumentos quirúrgicos

Para tratamientos quirúrgicos y endodónticos

P. ej. Jeringas, forceps, elevadores, instrumentos endodónticos y periodontales e instrumentos quirúrgicos rotatorios

Instrumentos de transmisión

Instrumentos de transmisión para tratamientos generales restaurativos y ortodónticos

Instrumentos de transmisión para el tratamiento quirúrgico y endodóntico

Parte de manejo y la parte angulada

9.3 - Instrumentos críticos ***:

Embolsados en bolsas estériles según EN868 resp. DIN 58952/58953

10 Durante el almacenamiento se protege del riesgo de contaminación

11 Aprobación documentada del uso de dispositivos médicos

12 Almacenamiento protegido de la contaminación

El proceso se lleva a cabo de la misma forma que en cirugía general, instrumentos rotatorios (paso 3.9 de acuerdo con las instrucciones del fabricante)

Superficie externa: Desinfección y limpieza con toallita

Interior: Limpieza/ Desinfección

Cuidado: (lubricado de la parte interna)

Procesado de la máquina:

Limpieza y desinfección (interior y exterior) lubricando la sección interna, esterilización en el autoclave (tipo S ó B).

Instrumentos Semicríticos **

Instrumentos Críticos ***

Limpieza y desinfección (interior y exterior) lubricando la sección interna, esterilización en el autoclave (tipo S ó B).

Esterilización por vapor con un método efectivo validado

Alacena, cajón (a prueba de suciedad)



KDM Kwipes Toallitas con toallitas desechables

KDM Kwipes Spray sin diluir

Producto:

Producto:

Tiempo:

Producto:

Tiempo:

Producto:

Tiempo:

Lubricación para el mantenimiento

Producto:

Marca de la máquina:

Temperatura: (°C)

Tiempo de ejecución: min.

Periodo de almacenaje según EN 868

Después de cada tratamiento y después de que haya muestras de contaminación

Después de cada tratamiento y después de que haya muestras de contaminación

Persona encargada:

Persona encargada:

Persona encargada:

Sistema de Aspiración

Aspire una mezcla de agua y aire a través del sistema

Limpieza y /o desinfección:

Aspire una mezcla de aire, agente limpiador y/o desinfectante (1 L) despacio (con un sistema de mantenimiento apto) a través del sistema y viértalo en la escupidera.

Cambiar y limpiar el filtro

de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

agua fría (1/2 litro)

Agente de limpieza o desinfectante el cual es efectivo contra sangre/ saliva.



KDM Bioklair Diario (5%) o **KDM Bioklair Semana (5%)**

Dosificación:

-Para limpieza del contenedor de secreciones, llevar gafas y guantes protectores y use una toalla de un solo uso y cepillo; después desinfectar el cepillo.

- No tocar las zonas contaminadas del filtro

- Lleve gafas protectoras

Si es posible, después de cada tratamiento en el que se use el tubo de aspiración (particularmente sangre).

1-2 veces al día (hora de comer y por la noche)

1 litro por los tubos de aspiración y 1 litro en la escupidera

S: Semana		D: Diario		
S	S	D	D	D
Lu	Ma	Mx	Ju	Vi

Enjuague bien con agua antes de empezar a trabajar.

según sea necesario

Persona encargada:

Filtro

Acoplamiento removibles etc.

Desinfección, limpieza
baño térmico o baño químico

Termodesinfectadora o desinfectante de instrumental

según sea necesario/contaminación

Separadores de amalgama

Cambio/vaciado
del contenedor colector y desecho del material por separado de acuerdo con las instrucciones del fabricante

- No tocar las partes contaminadas del separador
- Lleve guantes protectores y equipo de protección

según sea necesario

Impresiones

p.ej. Alginatos, siliconas, poliéteres, hidrocoloides y accesorios para implantes en prótesis, modelos en yeso, registros de mordida, (silicona, resina y cera), articuladores, fijadores, oclusores, arcos faciales, etc..

Procedimiento de trabajo:
-Limpiar con agua

Preparación y dosificación



KDM Impression Clean
Listo para usar / sin diluir
Tiempo de contacto

- Inmediatamente después de que se haya tomado la impresión
- Antes de enviarlo al laboratorio dental
- Al recibirlo del laboratorio dental

Persona encargada:

Tratamiento de descontaminación del agua de los sistemas dentales

Todas las conducciones acuíferas, tubos conductores, grifo para el vaso, dispositivos periféricos que se hayan conectado, tanto instrumental como grifería

Descontaminación continua por un sistema automático de descontaminación

o:
Desinfección durante periodos en los que esté cerrado/vacaciones
- **Inyección de KDM Pure Fluid en los conductos de los instrumentos y del grifo para el vaso**
- **Antes de empezar a trabajar enjuague las conducciones de los instrumentos y el grifo para el vaso con agua**



Dosificación: Concentrado en el sistema de descontaminación
KDM Pure Fluid
para descontaminación continua

Dosificación: sin diluir

Dispositivo: **Sistema Semanal/BCS**

- según necesite el sistema de descontaminación

Persona encargada:

- una vez a la semana o durante las vacaciones
- después del fin de semana o vacaciones

Contenedor

Recogida
Objetos con punta, afilados y frágiles se deben tapar de forma segura antes de colocarlos en el contenedor. Por favor, tenga en mente la posibilidad de reciclaje.

P. ej. contenedores llenos de elementos frágiles, afilados o puntiagudos deben cubrirse con yeso y cerrarse fuertemente.

Según sea necesario, diariamente

Persona encargada:

Ropa de cirugía

Recogida
Desinfección y limpieza

P. ej. en lavadora a (95°)
agente desinfectante (60°)

- Según sea necesario, diariamente

Persona encargada:

Nuestro depósito dental:



Especialidades Dentales KALMA, S.A.
Camino de Hormigueras, 118, 3º y 4º planta. 28031 Madrid
Tlf. 91 380 23 83 (10 líneas)
Fax. 91 778 48 64 / 91 778 46 47
www.kalma.es / kalma@kalma.es